

PAKKAUSSELOSTE
A-VITA PLUS®



Nenäsuihke, joka sisältää A- ja E-vitamiinia

Lue tämä seloste kokonaan ennen kuin aloitat tämän valmisteen käytön.

1. Mitä A-Vita Plus® nenäsuihke on ja mihin sitä käytetään

A-Vita Plus® nenäsuihke on lääkinällinen laite, joka voitelee nenän limakalvoja ja ylläpitää niiden kosteutusta sekä edistää limakalvoepiteelin uusiutumista.

A-Vita Plus® nenäsuihke on tarkoitettu erityisten ympäristöolosuhteiden, nenäsumutteiden, aerosolihoidon tai tilapäisten sairaustilojen (ts. lääkenuhan, allergisen nuhan tai hajunenän) aiheuttaman nenän limakalvojen kuivuuden ja/tai surkastumisen hoitoon.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät A-Vita Plus® nenäsuihketta

Älä käytä tätä valmistetta, jos olet yliherkkä jollekin sen sisältämistä aineista (lueteltu kohdassa 6).

3. Miten A-Vita Plus® nenäsuihketta käytetään

- Poista suojakorkki. Aseta peukalosi pullon pohjaan ja etusormesi sekä keskisormesi sumuttimen siivekkeille ja paina siivekkeitä alaspäin. Päästä sitten siivekkeistä irti. Toista, kunnes ensimmäinen suihkeannos vapautuu pullostä. Kallista päätäsi hieman eteenpäin ja hengitettyäsi hitaasti ulos suihkautta valmistetta sieraimen. Hengitä sisään ja sulje toisen kätesi sormella sierain, johon et suihkuttanut valmistetta.
- Suositeltu annostus: kaksi suihkausta sierainta kohti kahdesti päivässä tai lääkärin ohjeen mukaan.
- A-Vita Plus® nenäsuihketta voidaan käyttää myös, jos nenän limakalvoissa tai sieraimia ympäröivässä ihossa on pieniä vaurioita.

4. Varoitukset

- Jos hättävää vaikutuksia ilmenee, lopeta hoito ja ota yhteyttä lääkäriin.
- Älä niele valmistetta.
- Valmistetta ei tule antaa muiden käyttöön.
- Vältä valmisteen joutumista silmiin.
- Ennen käyttöä varmista, että pakkaus ja/tai pullo on ehjä.
- Älä käytä tätä valmistetta pakkauksen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä koskee ehjää ja oikealla tavalla säilytettyä valmistetta.

5. A-Vita Plus® nenäsuihkeen säilyttäminen

- Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
- Sulje pullo huolellisesti käytön jälkeen.
- Säilytä alle 30 °:ssa.

6. Muut tiedot

Ainesosat: deksipantenoli, E-vitamiiniasetaatti, A-vitamiinipalmiitti, hydrogenoitu risiiniöljy 40 haihtuva öljy, etyleenidiamiinitetraetikkahapon (EDTA) natriumsuola, natrium-N-(hydroksimetyyli)-glysiinaatti, kaliumsorbaatti, ksantaanikumi, luontaiset makuaineet, isotoninen puskuriliuos, jonka pH on 7,2.

Pakkaus: 20 ml:n pullo.



MADE IN ITALY
Valmistaja:

DMG

Lääkinällinen laite



BIPACKSEDEL



A-VITA PLUS®

Nässpray med A- och E-vitamin

Läs igenom hela denna bipacksedel innan du börjar använda produkten.

1. Vad A-Vita Plus® nässpray är och vad det används för

A-Vita Plus® nässpray är en medicinteknisk produkt som smörjer nässlemhinnan och bibehåller dess och fuktar samt främjar uppkomsten av nytt slemhinneepitel. A-Vita Plus® nässprayen är avsedd för behandling av torr och/eller förtvinad (atrofisk) nässlemhinna till följd av vissa särskilda förhållanden i omgivningen, användning av nässprayer eller aerosoler eller tillfälliga sjukdomstillstånd (såsom läkemedelsinducerad eller allergisk rinit eller stinknäsa).

2. Vad du behöver veta innan du använder A-Vita Plus® nässpray?

Använd inte detta preparat om du är överkänslig mot något av dess innehållsämnen (anges i avsnitt 6).

3. Hur du använder A-Vita Plus® nässpray

- Avlägsna skyddslocket. Placera din tumme i botten på flaskan och ditt pek- och långfinger på spraypumpens vingar. Tryck sedan vingarna nedåt. Släpp greppet, och upprepa pumpningarna tills den första dosen frigörs ur flaskan. Böj sedan huvudet lätt framåt och spraya preparatet i ena näsborren efter att du långsamt andats ut. Andas sedan in och täpp med ett finger till den näsborre i vilken du inte sprayat preparatet.
- Rekommenderad dos: 2 spraypumpningar per näsborre 2 gånger dagligen, eller i enlighet med läkarordination.
- A-Vita Plus® nässpray kan användas också då det förekommer små skador på huden runt näsborrarna eller på själva nässlemhinnan.

4. Varningar

- Om du observerar biverkningar ska du sluta använda detta preparat och kontakta läkare.
- Svälj inte preparatet.
- Ge det inte till andra.
- Undvik att få preparatet i ögonen.
- Försäkra dig om att förpackningen och/eller flaskan är hel innan du börjar använda preparatet.
- Använd inte detta preparat efter det utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet gäller för hel förpackning som förvarats på korrekt sätt.

5. Hur A-Vita Plus® nässprayen ska förvaras

- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
- Tillslut flaskan väl efter varje användning.
- Förvaras vid högst 30 °C.

6. Övrig information

Innehållsämnen: dexpantenol, E-vitaminacetat, A-vitaminpalmitat, hydrogenerad ricinolja 40 eterisk olja, dinatriumsalt av etylendiamintetraättiksyra (EDTA), natrium-N-(hydroximetyl)-glycinat, kaliumsorbat, xantangummi, naturliga aromämnen, isoton buffertlösning med ett pH-värde på 7,2.

Förpackning: Flaska på 20 ml.



Medicinteknisk medel



30FG143-A1 2-10/10/2023

Via Laurentina, km 26,700, 00071 Pomezia (Rom) – Italien – www.dmgit.com
Distributör: Orifarm Healthcare A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Danmark

1000145971-002-01 / Rev 08/2023