

PAKKAUSSELOSTE

ORIFARM



## Nenäsuihke, joka sisältää ristikkäissidottua hyaluronihappoa, dekspantenolia, biotiinia sekä A- ja E-vitamiinia.

Lue tämä seloste kokonaan ennen kuin aloitat tämän valmisteen käytön.

### 1. Mitä A-vita® Hydra + nenäsuihke on ja mihin sitä käytetään

A-vita® Hydra+ nenäsuihke on lääkinällinen laite, joka voitelee nenän limakalvoja ja ylläpitää niiden kosteutusta ja joustavuutta sekä edistää limakalvoepiteelin uusiutumista.

Ristikkäissidottu hyaluronihappo (0,1 %) ja dekspantenoli (1 %) tehostavat nenän limakalvojen kosteutusta ja viskoelastisuutta. Biotiini, A- ja E-vitamiini edesauttavat limakalvojen normaalia toimintaa.

A-vita® Hydra+ nenäsuihke on tarkoitettu:

- erityisten ympäristöolosuhteiden tai hoitotoimenpiteiden (pölyn, ärsyttävien aineiden, nenää avaavien sumutteiden, happihoidon jne.) aiheuttaman nenän limakalvojen kuivuuden ja/tai surkastumisen hoitoon
- nenän ja sivuonteloiden sairauksien (rinosinuiitti, allerginen nuha, lääkenuha, krooninen atrofinen nuha jne.) tukihoidon
- nenän ja sivuonteloiden sairauksien leikkauksen jälkeiseen hoitoon edistämään normaalin limakalvotoiminnan palautumista.

### 2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät A-vita® Hydra+ nenäsuihketta

Älä käytä tätä valmistetta, jos olet yliherkkä jollekin sen sisältämistä aineista (lueteltu kohdassa 6).

### 3. Miten A-vita® Hydra+ nenäsuihketta käytetään

- Poista suojakorkki. Aseta peukalosi pullon pohjaan ja etusormesi sekä keskisormesi sumuttimen siivekkeille ja paina siivekkeitä alaspäin. Päästä sitten siivekkeistä irti. Toista, kunnes ensimmäinen suihkeannos vapautuu pullosta. Kallista päätäsi hieman eteenpäin ja hengitettyäsi hitaasti ulos suihkauta valmistetta sieraimen. Hengitä sisään ja sulje toisen kätesi sormella sierain, johon et suihkuttanut valmistetta.
- Suositeltu annostus: kaksi suihkausta sierainta kohti kahdesti päivässä tai lääkärin ohjeen mukaan.
- A-vita® Hydra+ nenäsuihketta voidaan käyttää myös, jos nenän limakalvoissa tai sieraimia ympäröivässä ihosta on pieniä vaurioita.

### 4. Varoitukset

- Jos haittavaikutuksia ilmenee, lopeta hoito ja ota yhteyttä lääkäriin.
- Älä niele valmistetta.
- Valmistetta ei tule antaa muiden käyttöön.
- Vältä valmisteen joutumista silmiin.
- Ennen käyttöä varmista, että pakkaus ja/tai pullo on ehjä.
- Älä käytä tätä valmistetta pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä koskee ehjää ja oikealla tavalla säilytettyä valmistetta.

### 5. A-vita® Hydra+ nenäsuihkeen säilyttäminen

- Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
- Sulje pullo huolellisesti käytön jälkeen.
- Säilytä alle 30 °C:ssa.

### 6. Muut tiedot

Ainesosat: dekspantenoli, E-vitamiiniasetaatti, A-vitamiinipalmitaatti, biotiini, hydrogenoitu risiiniöljy 40 haihtuva öljy, ristikkäissidottu hyaluronihappo, etyleenidiamiinitetraetikkahapon (EDTA) natriumsuola, natrium-N-(hydroksimetyyli)-glysiinaatti, kaliumsorbaatti, luontaiset makuaineet, isotoninen puskuriliuos, jonka pH on 7,2.

**Pakkaus:** 20 ml:n pullo.

Rev. 11/2023



Lääkinällinen laite



Via Laurentina, km 26,700, 00071 Pomezia (Rooma) – ITALIA – www.dmgit.com

**Jakelija:** Orifarm Healthcare A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Tanska

BIPACKSEDEL



### Nässpray med korsbunden hyaluronsyra, dexpantenol, biotin samt A- och E-vitamin

Läs igenom hela denna bipacksedel innan du börjar använda produkten.

#### 1. Vad A-vita® Hydra+ nässpray är och vad det används för

A-vita Hydra+ nässpray är en medicinteknisk produkt som smörjer näslemhinnan och bibehåller dess fukt och elasticitet samt främjar uppkomsten av nytt slemhinneepitel.

Den korsbundna hyaluronsyran (0,1 %) och dexpantenolen (1 %) i preparatet effektiviserar återfuktandet av, och viskoelasticiteten hos näslemhinnan. Biotin samt vitaminerna A och E bidrar till att bibehålla normalt fungerande slemhinnor.

A-vita® Hydra+ nässpray är avsedd:

- för behandling av torr och/eller förtvinnad (atrofisk) näslemhinna till följd av vissa förhållanden i omgivningen eller olika ingrepp/ behandlingar (damm, irriterande substanser, sprayer som öppnar en täppt näsa, syrgasbehandling m.m.)
- som stödbehandling vid olika sjukdomar i näsa eller bihålor (rinosinuit, allergisk snuva, läkemedelsorsakad snuva, kronisk atrofisk rinit m.m.)
- som behandling efter kirurgiska ingrepp vid sjukdomar i näsa eller bihålor för att främja återställandet av en normalt fungerande slemhinna.

#### 2. Vad du behöver veta innan du använder A-vita® Hydra+ nässpray?

Använd inte detta preparat om du är överkänslig mot något av dess innehållsämnen (anges i avsnitt 6).

#### 3. Hur du använder A-vita® Hydra+ nässpray

- Avlägsna skyddslocket. Placera din tumme i botten på flaskan och ditt pek- och långfinger på spraypumpens vingar. Tryck sedan vingarna nedåt. Släpp greppet, och upprepa pumpningarna tills den första dosen frigörs ur flaskan. Böj sedan huvudet lätt framåt och spraya preparatet i ena näsborren efter att du långsamt andats ut. Andas sedan in och täpp med ett finger till den näsborre i vilken du inte sprayat preparatet.
- Rekommenderad dos: 2 spraypumpningar per näsborre 2 gånger dagligen, eller i enlighet med läkarordination.
- A-vita® Hydra+ nässpray kan användas också då det förekommer små skador på huden runt näsborrarna eller på själva näslemhinnan.

#### 4. Varningar

- Om du observerar biverkningar ska du sluta använda detta preparat och kontakta läkare.
- Svälj inte preparatet.
- Ge det inte till andra.
- Undvik att få preparatet i ögonen.
- Försäkra dig om att förpackningen och/eller flaskan är hel innan du börjar använda preparatet.
- Använd inte detta preparat efter det utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet gäller för hel förpackning som förvarats på korrekt sätt.

#### 5. Hur A-vita® Hydra+ nässprayer ska förvaras

- Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
- Tillslut flaskan väl efter varje användning.
- Förvaras vid högst 30 °C.

#### 6. Övrig information

Innehållsämnen: dexpantenol, E-vitaminacetat, A-vitaminpalmitat, biotin, hydrogenerad ricinolja 40 eterisk olja, korsbunden hyaluronsyra, dinatriumsalt av etylendiamintetraättisyra (EDTA), natrium-N-(hydroximetyl)-glycinat, kaliumsorbat, naturliga aromämnen, isoton buffertlösning med ett pH-värde på 7,2.

**Förpackning:** Flaska på 20 ml.



Rev. 11/2023  
Medicinteknisk produkt



30FG138-A1  
1000145710-002-01  
11-12-2023

Via Laurentina, km 26,700, 00071 Pomezia (Rom) – ITALIEN – www.dmgit.com  
**Distributör:** Orifarm Healthcare A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Danmark